



Anleitung zur Entnahme der Speichelprobe

Bitte lesen Sie sich die Anleitung zunächst sorgfältig durch!

Wichtiger Hinweis zur Probenentnahme:

In den 30 Minuten vor Entnahme der Speichelprobe **NICHT** essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen.


Aufbau des Röhrchens:

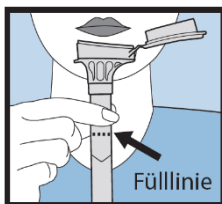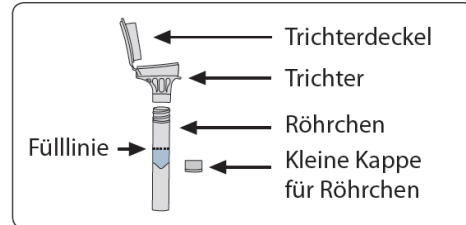

1


Spucken Sie solange in das Röhrchen, bis die Menge des flüssigen Speichels (ohne Luftbläschen) die gezeigte Fülllinie erreicht.

Dieser Schritt dauert bei den meisten Personen zwischen 2 und 5 Minuten.

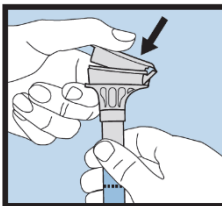


2

Halten Sie das Röhrchen mit einer Hand aufrecht und schließen Sie wie gezeigt mit der anderen Hand den Deckel, indem Sie ihn fest andrücken, bis ein lautes Klicken zu hören ist. Die Flüssigkeit im Deckel wird in das Röhrchen freigegeben und vermischt sich mit dem Speichel.

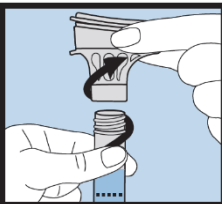


3

Halten Sie das Röhrchen aufrecht und schrauben Sie den Trichter vom Röhrchen ab.

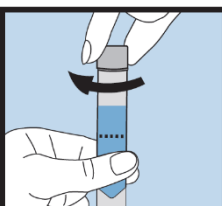

4

Verschließen Sie das Röhrchen mit der kleinen Kappe, die im Set enthalten ist. Achten Sie darauf, dass das Röhrchen fest verschlossen ist.

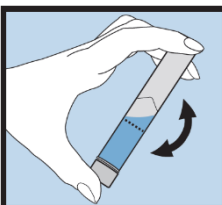

5

Schütteln Sie das verschlossene Röhrchen 5 Sekunden. Den Trichter können Sie ganz normal im Hausmüll entsorgen.

6

Ergänzen Sie mit einem wasserfesten Stift auf dem Etikett des Speichelröhrchens noch das Datum Ihrer Speichelabgabe.

Legen Sie das verschlossene und beschriftete Röhrchen mit Ihrem Speichel in das zweite beiliegende Röhrchen (Transportröhrchen) und verschließen Sie auch dieses. Anschließend umwickeln Sie das Transportröhrchen noch mit dem beiliegenden weißen Vließ.

Haben Sie Fragen zur Entnahme der Speichelprobe? Dann melden Sie sich bei uns!

0228-6885 421 mitmachen@bosco-studie.de